


使用 Lite 智慧胸帶前，請先閱讀本文件。

感謝選用台灣生理科技股份有限公司產品 Smart 智慧胸帶系列。

LifeVisa Lite 智慧胸帶可同時支持藍芽數位心率手機應用程式（例如本公司 BluePulse 安卓手機 APK）和獨特的 Team-100 多人心率監視系統，這也表示著它可以在連接時髦的智慧手機或俱有藍芽心率接收功能的運動器材的同時也傳送心率值到 Team-100 多人心率監視系統，雙倍的增加運動安全與效率。

首先讓我們先了解胸帶的藍芽配對功能（適用本公司 BluePulse 安卓手機 APK）：

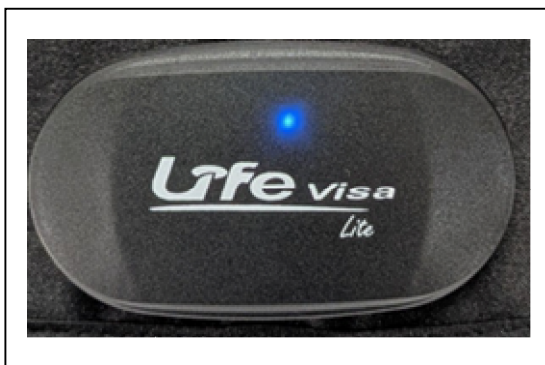

LifeVisa Lite 心率胸帶當被配戴到使用者胸前時（配戴方式請參閱胸帶使用說明書），心率偵測電子盒內的藍色 LED 閃爍表示著胸帶已自動開機，等待著和藍芽心率接收裝置配對（以手機 APP 為例：藍芽配對方式請參考手機 APP 使用手冊）若胸帶於 30 秒內未和俱有接收藍芽心率的接收裝置（如：手機、或運動器材）完成配對，則為了節省電力消耗，胸帶會自動進入節電功能此刻的 LED 燈閃爍間格時間會延長（變慢）。

接著讓我們再了解 Lite 智慧胸帶和 Team-100 的多人心率監視功能：

Lite 智慧胸帶被穿戴後無需經過“配對程序”即會自動的向 Team-100 接收機宣告胸帶的識別號碼（ID），經由接收機電腦 APP 操作掃描並顯示到電腦屏幕。再經操作者選定（電腦操作流程，請參考文件“Team-100 操作流程”），如此胸帶穿戴者既可使用市面上標準藍芽通訊格式的配對來連接手機或運動器材，保密個資記錄且達到運動效能，也能使用 Team-100 多人心率監視系統增加運動安全！。

大家一起來享受運動吧！！

歡迎使用安卓 BulePulse 心率應用程式。QR code 掃描下載前請先閱讀“下載流程”。