


安卓手機 Lifevisa BluePulse 心率應用程式下載流程

以下應用程式下載流程範例使用 Pixel 8a，安卓版本 16，請自行對照您所使用的安卓手機。


1、以手機掃描 QR code，點選 QR code 網址下載應用程式

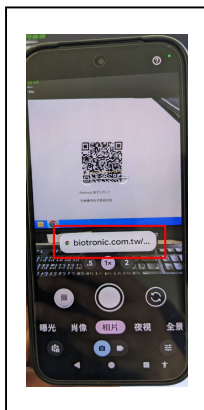


2、解壓縮



點選下載檔案進行解壓縮。

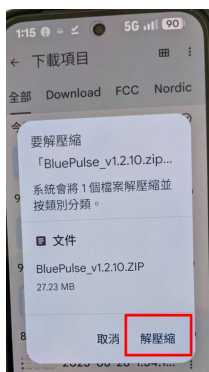

勾選解壓縮

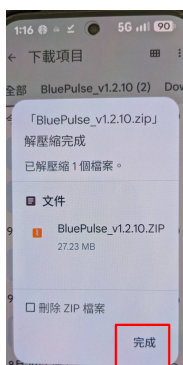

點選“完成”按鈕。

3、修改副檔名為 APK



勾選被解壓縮完成後的 ZIP 檔右上三功能點。




選擇“重新命名”




將 ZIP 副檔名改為 APK 並按下“確定”按鈕

4、允許重新修改副檔名

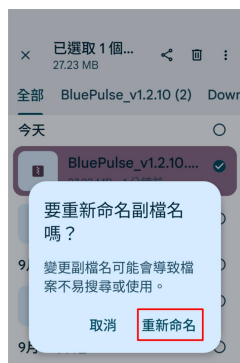

回應手機詢問並確定“重新命名”。

5、準備安裝應用程式

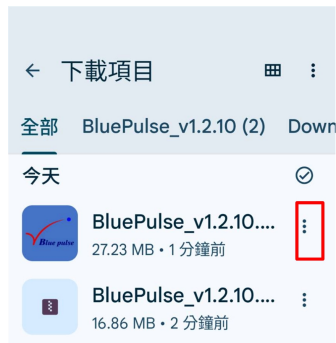

程式已經被解壓縮且修改副檔名完成，
按右角三功能點，準備進程式安裝。




選擇“安裝”功能進程式安裝。



回覆手機詢問確認“安裝”。



安裝進行中及完成，勾選“開啟”。

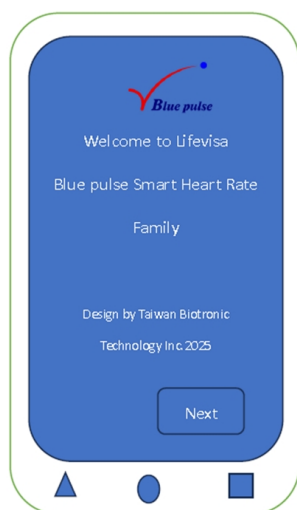

恭喜！安卓手機已安裝完成 Lifevisa BluePulse 安卓心率
APK，現在開始享受健康運動並且使用這個應用程式分享你的歡樂給朋友。

對安裝過程有任何問題，歡迎 e-mail 詢問。

e-mail : Lifevisa@biotronic.com.tw